

Руководство пользователя

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «Доктор в кармане 2.0»

Общие сведения

ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0» реализована отдельным интернет-приложением с пользовательским веб-интерфейсом, предоставляя пользователю возможность пройти тестирование и получить заключение.

На основании ответов пользователя ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0» сопоставляет симптомы, указанные в ответах пользователя, с симптомами, имеющимися в базе данных ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0», и выявляет, на основании внутренних алгоритмов, взаимосвязь между симптомами и возможными заболеваниями пользователя.

Внутренние алгоритмы определяют соответствие симптомов тем или иным заболеваниям на основе калькуляции и предоставления каждому из симптомов балла, в зависимости от частоты проявления их в различных заболеваниях и формируют заключение.

В прикладном аспекте ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0» является программой, позволяющей пользователю пройти опрос о наличии симптомов, на основе которых посредством алгоритма определения вероятности наличия заболевания, разделения вероятностей в процентном соотношении, осуществляется определение характера заболевания и срочности обращения к врачу.

ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0» распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке ПЭВМ на стороне пользователя не требуются. Продажа неисключительных лицензий ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0» по модели SAAS осуществляется с использованием встроенных механизмов на сайте <https://anamnesis.c4lbots.ru/>.

Руководство пользователя

Для начала работы с ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0» в строке браузера необходимо ввести URL-адрес программы <https://anamnesis.c4lbots.ru/>.

Для того чтобы воспользоваться функциями ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0», пользователю необходимо заполнить форму, внешний вид которой представлен на рисунке 1, согласиться с обработкой персональных данных, для этого поставить галочку на чек-боксе «Начиная прохождение, Вы даёте согласие на обработку персональных данных» и затем нажать на кнопку «Продолжить».

Начать прохождение

Краткое описание сервиса, стоимости использования и доступных способов оплаты.

Ваше имя


Ваша электронная почта

Ваш телефон

☐ Начиная прохождение, Вы даёте согласие на обработку персональных данных

Продолжить

Рисунок 1 – Внешний вид формы для начала работы с ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0»

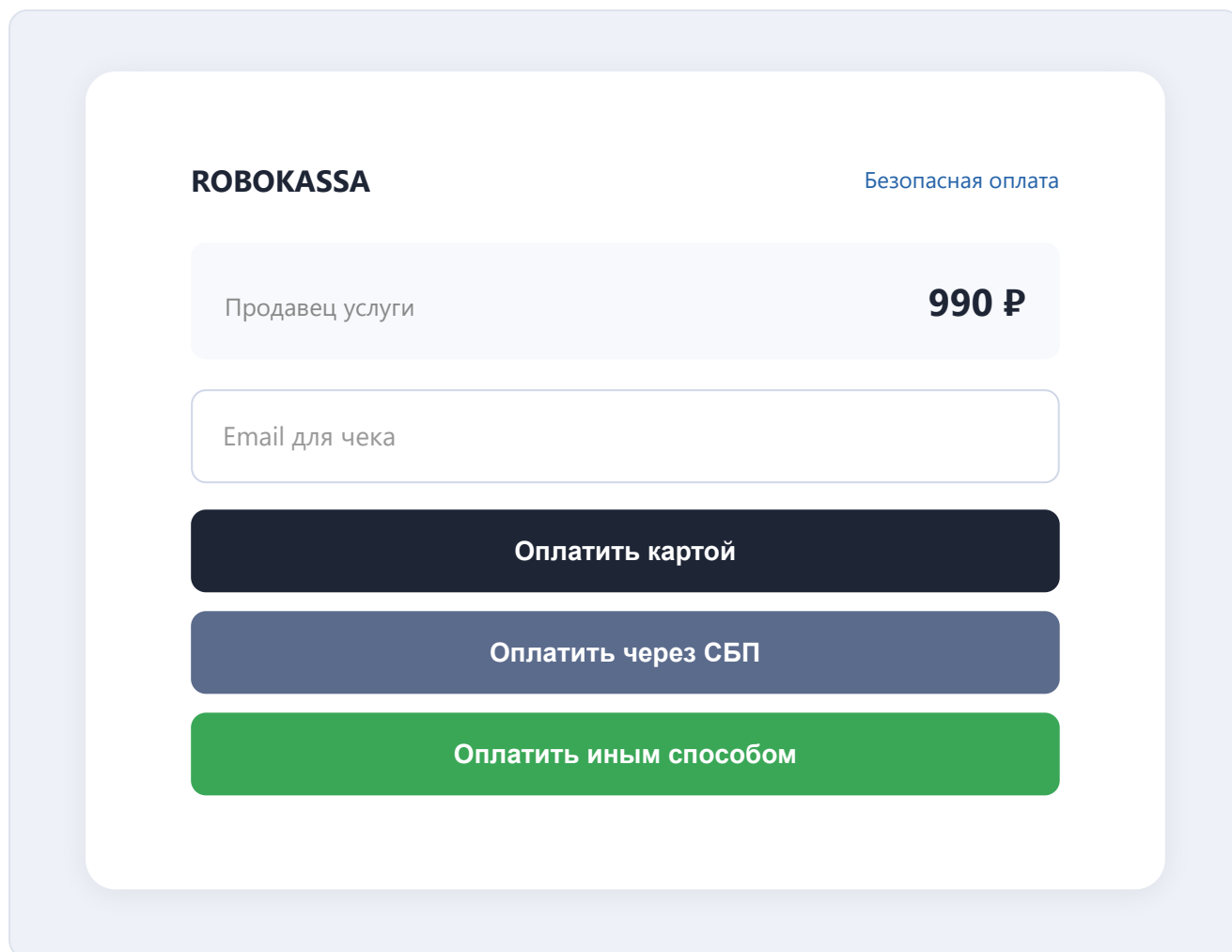

ROBOKASSA Безопасная оплата

Продавец услуги **990 ₽**


Email для чека

Оплатить картой

Оплатить через СБП

Оплатить иным способом

Рисунок 2 – Внешний вид формы оплаты ROBOKASSA

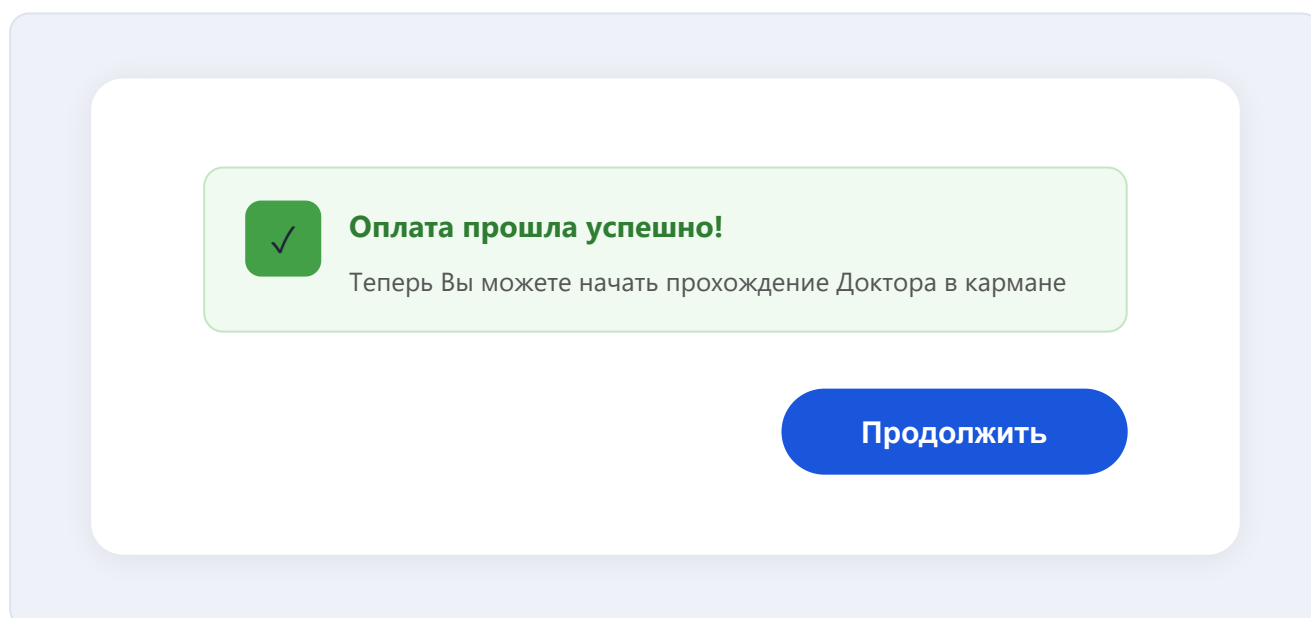

 **Оплата прошла успешно!**


Теперь Вы можете начать прохождение Доктора в кармане

Продолжить

Рисунок 3 – Окно с уведомлением об «Успешной оплате»

Пользователю будет предложено выбрать свой пол. Для этого пользователю необходимо, используя мышку, выбрать свой пол и нажать на кнопку «Следующий». Внешний вид окна выбора пола представлен на рисунке 4.

Выберите свой пол.

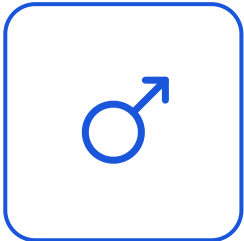

МужскойЖенский

ПредыдущийСледующий

Рисунок 4 – Внешний вид формы выбора пола

Далее пользователю будет предложено выбрать свой возраст. Используя мышку, необходимо, передвигая ползунок, выбрать свой возраст. Для выбора возраста можно также использовать кнопки:



Затем необходимо нажать на кнопку «Следующий». Внешний вид окна выбора возраста представлен на рисунке 5.

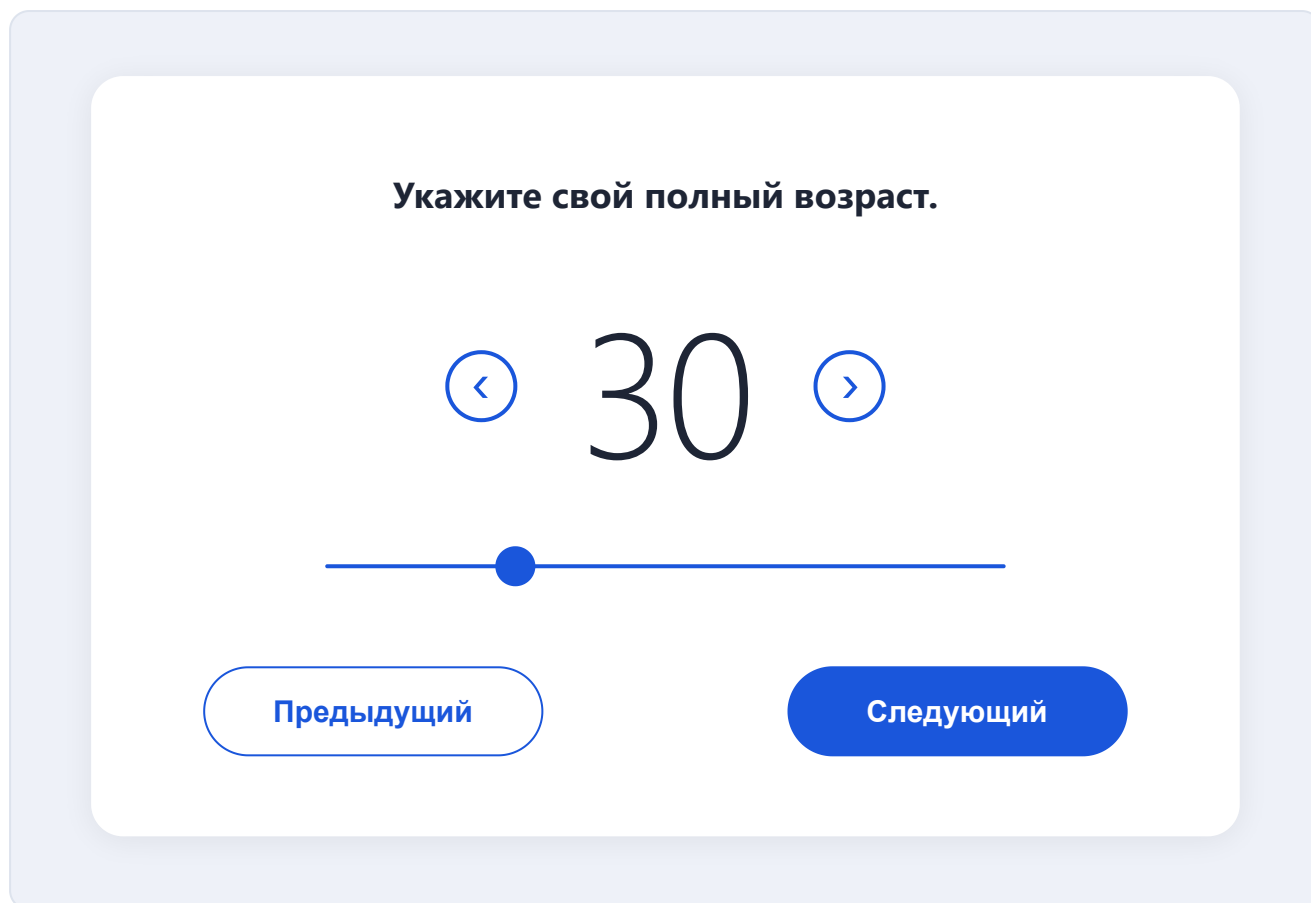


Рисунок 5 – Внешний вид формы выбора возраста

Далее пользователю будет предложено выбрать свой рост. Используя мышку, необходимо, передвигая ползунок, выбрать свой рост. Для выбора возраста можно также использовать кнопки:



Затем необходимо нажать на кнопку «Следующий». Внешний вид окна выбора роста представлен на рисунке 6.

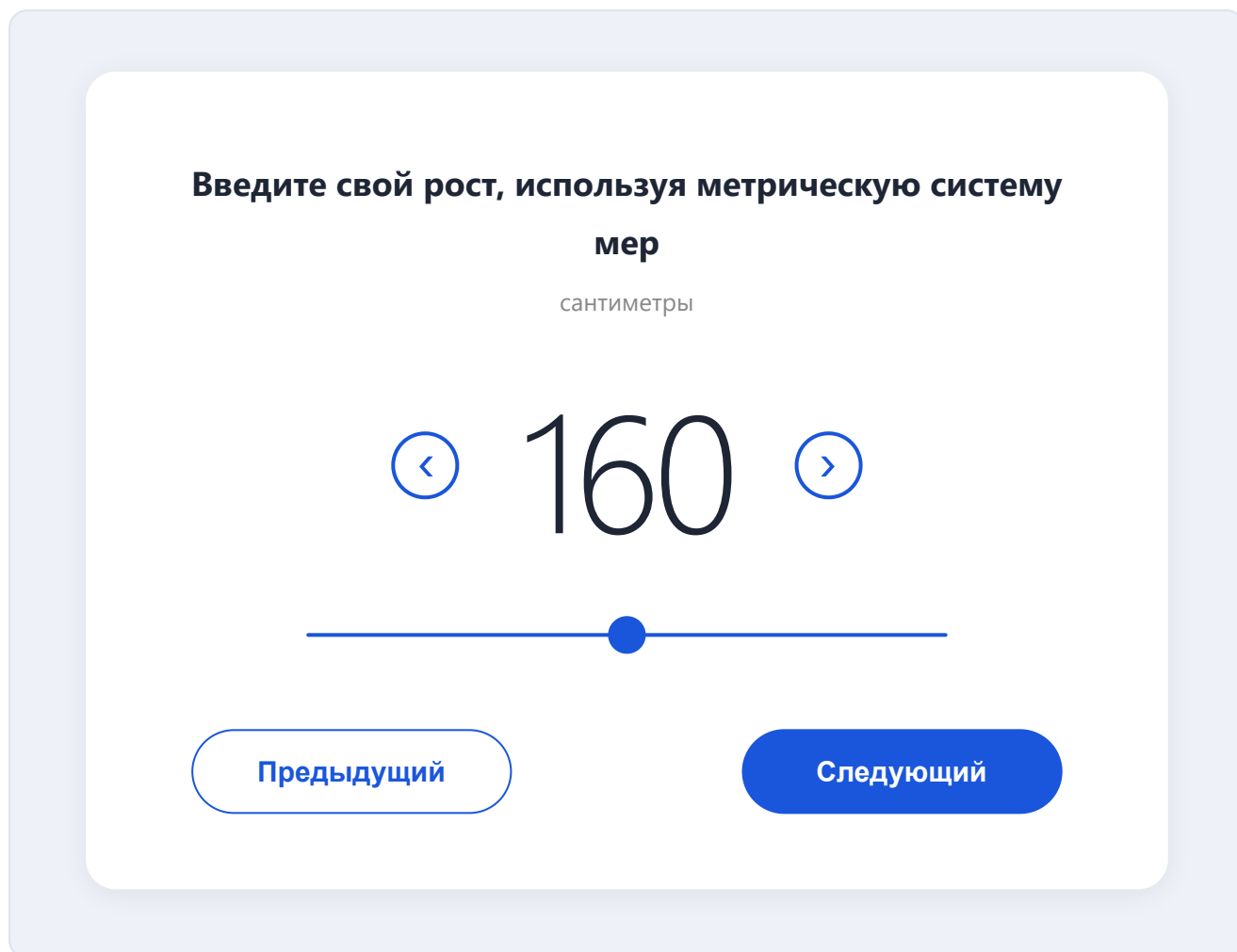


Рисунок 6 – Внешний вид формы выбора роста

Далее пользователю будет предложено выбрать свой вес. Используя мышку, необходимо, передвигая ползунок, выбрать свой вес. Для выбора возраста можно также использовать кнопки:



Затем необходимо нажать на кнопку «Следующий». Внешний вид окна выбора веса представлен на рисунке 7.

Введите свой вес, используя метрическую систему мер.

килограммы

< 60 >

Предыдущий Следующий

Рисунок 7 – Внешний вид формы выбора веса

Далее пользователю будет предложено описать свои симптомы, на которые он жалуется. В поле поиска необходимо начать вводить описание симптома. В момент набора текста, пользователю будут предлагаться подсказки описания симптомов, которые содержатся в базе данных ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0». Из выпадающих подсказок нужно выбрать свой симптом и нажать на кнопку «Enter», выбранный симптом отобразится ниже. Далее необходимо повторить процедуру ввода следующего симптома. Для получения более детального прогноза пользователю нужно ввести как можно больше симптомов. После ввода всех данных необходимо нажать на кнопку «Следующий». Внешний вид окна ввода симптомов представлен на рисунке 8.

Добавить симптомы

Добавьте как можно больше симптомов, чтобы получить наиболее точные результаты.

Поиск симптома

Часть тела

Свободное описание



Пожалуйста, добавьте не менее 3 симптомов

Предыдущий

Следующий

Рисунок 8 – Внешний вид формы ввода симптомов

На рисунке 9 представлен вариант окна выбора симптомов по части тела.


Добавить симптомы

Добавьте как можно больше симптомов, чтобы получить наиболее точные результаты.

Поиск симптома

Часть тела

Свободное описание

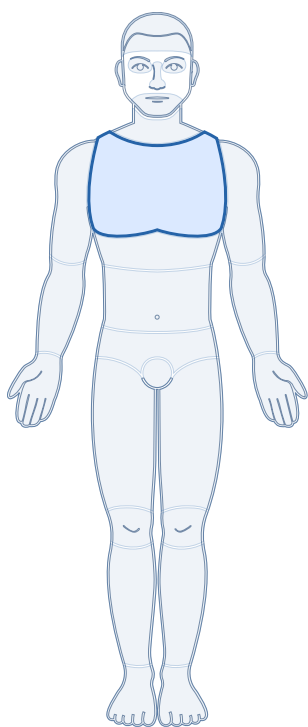

Грудь

Покраснение на груди

Кашель ночью

Втяжение или вдавление соска

Боль в груди, иррадиирующая между лопатками

Боль в груди, иррадиирующая в шею

Предыдущий

Следующий

Рисунок 9 – Внешний вид формы выбора симптомов по части тела

На рисунке 10 представлен вариант окна ввода симптомов в свободной форме.

Добавить симптомы

Добавьте как можно больше симптомов, чтобы получить наиболее точные результаты.

Поиск симптома Часть тела **Свободное описание**

Опишите ваши симптомы в свободной форме...

Предыдущий Следующий

Рисунок 10 – Внешний вид формы ввода симптомов в свободной форме

В зависимости от введенных данных пользователю будут предложены уточняющие вопросы по уточнению введенных симптомов. Пользователю необходимо отвечать на все вопросы и нажимать на кнопку «Следующий».

На рисунке 11 представлен вариант окна с уточняющими вопросами.

Когда появилась головная боль?

Длительная головная боль ☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

Внезапная головная боль ☒ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

[Предыдущий](#) [Следующий](#)

Рисунок 11 – Внешний вид формы приложения диалога с ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0»

По результатам введенных данных ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0», используя свои внутренние алгоритмы, сформирует заключение. Пример сформированного заключения представлен на рисунке 12.



Вы здоровы

Рекомендуем вам проконсультироваться с врачом в удобное для вас время

Симптомы, требующие дальнейшего обследования

Ниже приведены симптомы, отсортированные по степени важности. Обратите внимание на те, которые отмечены знаком высокого приоритета.

▲ Высокий риск ▲ Средний риск ▲ Низкий риск

Боль в коленном суставе

Боль в суставе запястья

Результаты

13 Мая 2026, 14:55

Вероятность заболевания

#1 Псевдоподагра

МКБ-10 **M11.1**

Больше о болезни



#2 Разрыв мениска

МКБ-10 **S83.2**

Больше о болезни

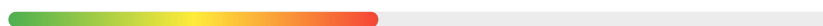


Рисунок 12 – Внешний вид формы заключения, сформированного ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0»

Пользователю доступны развернутые заключения от ПЭВМ «Доктор в кармане 2.0». Чтобы их посмотреть достаточно нажать на кнопку «Подробнее». В развернутом варианте заключения будут присутствовать следующие разделы:

- Описание;
- Симптомы;

- Диагностика;
- Уход;
- Рекомендуемые специалисты.

Для завершения прохождения необходимо нажать на кнопку «Закончить».

Результат прохождения будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при вводе персональных данных пользователя.